


利用を開始する



1) ACアダプタを電源に差します。



2) ACアダプタの先を本体側面にある、電源の差込口に差します。

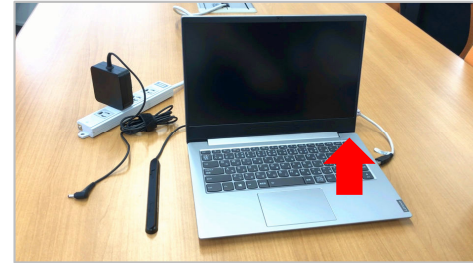


3) キーボード右上にある電源スイッチを押します。
★タブレットの場合は本体上面



4) eeyesが起動します。


スイッチを用いてスキャン入力を行う

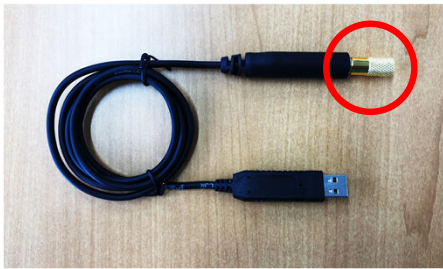

1) 任意のスイッチをスイッチケーブルの3.5mmコネクタに接続します。




2) スwitchケーブルを本体側面にある、USBに差します。

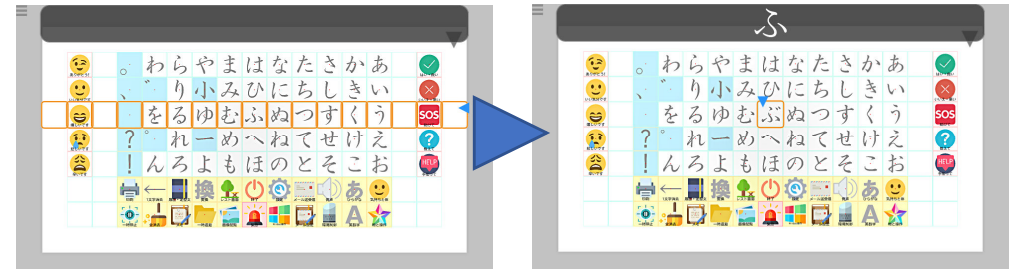


3) 入力したい文字にオレンジ色のカーソルが重なったらスイッチONにします。縦横一問わずスイッチを押す事により、入力したい文字を決定します。

スキャン入力と視線入力を切り替える


eeyesMiniは対象外

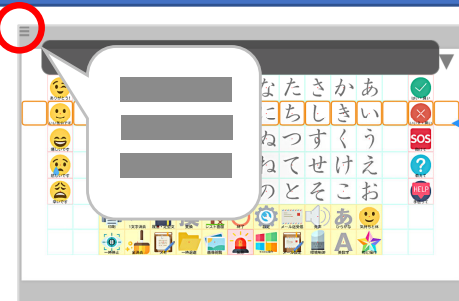

1) タッチパッドを使い画面左上のメニューアイコンをクリックします。

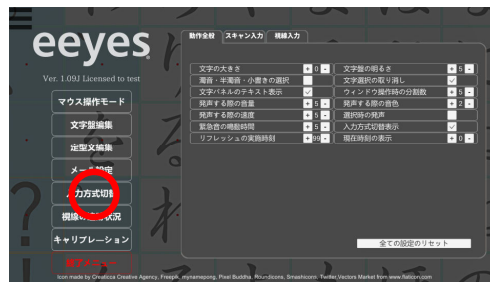


2) メニュー画面が表示されるので、「入力方式切替」をクリックします。

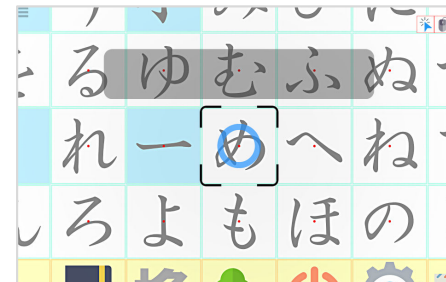


3) スキャン入力と視線入力が切り替わります。

アイトラッカーを用いて視線入力を行う


eeyesMiniは対象外

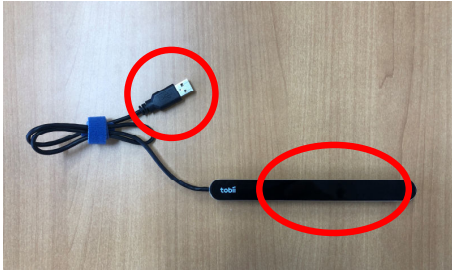

1) アイトラッカーを本体側面のポートに差し、赤く発光する事を確認します。

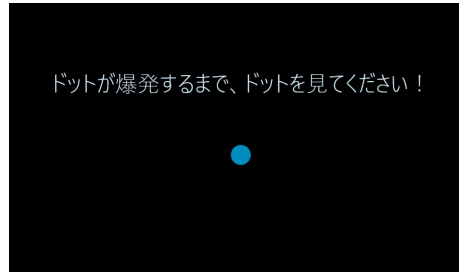

2) キーボードの「C」キーを押して、アイトラッカーの校正を実行します。

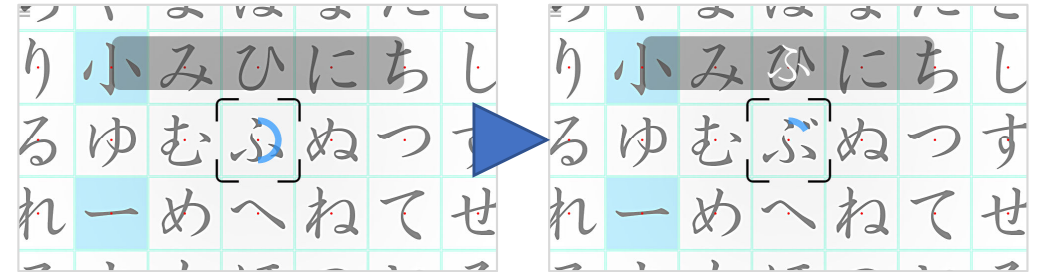

3) 入力したい文字パネルを見ると画面中央へ移動します。画面中央に来たら見続ける事により、入力したい文字を決定します。

利用を終了する



1) 終了アイコンを選択します。




2) 終了を選択します。




3) シャットダウンされ電源が切れます。

タッチパッドを使って操作を行う

ユーザによる
操作状態

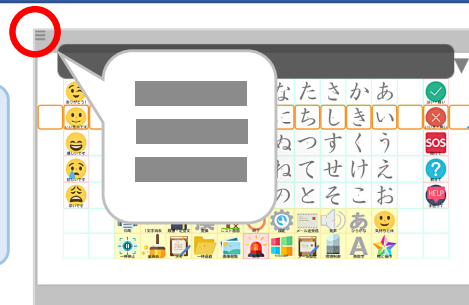

1) タッチパッドを使い画面左上のメニューアイコンをクリックします。
★キーボードの「M」キーを押してもマウス操作モードに変更できます。

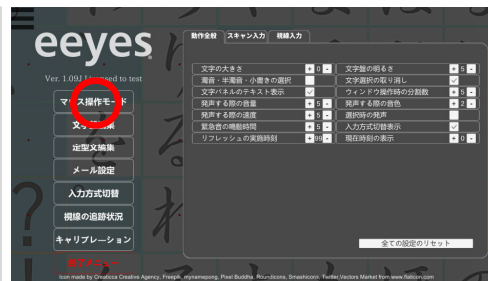

2) メニュー画面が表示されるので、「マウス操作モード」をクリックします。

介護者による
操作状態






3) マウス操作モードを解除する場合は、もう一度「マウス操作モード」をクリックします。
★もう一度の「M」キーを押してもマウス操作モードを解除できます。

トラブルシューティング

eeyes/eeyesMiniがフリーズした場合：

altキーとtabキーを同時に押すと、タスクスイッチャー画面が表示されますので、eeyesのタスクの右上にある「×」をクリックしてタスクを終了したうえで、デスクトップにあるeeyesのショートカットキーをダブルクリックして起動してください。

もし同画面が表示されない場合は、電源スイッチを押し続けeeyes/eeyesMiniを強制終了した後、起動してください。

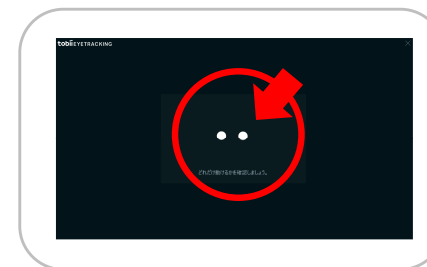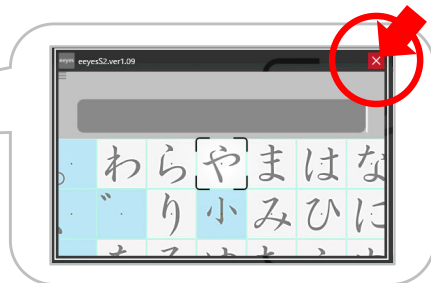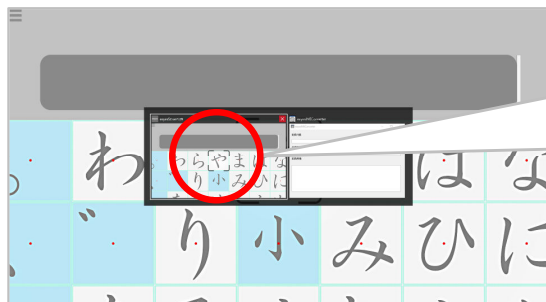

アイトラッカーの較正が上手くいかない場合：

較正を開始する際に表示される目（白い丸）がはっきり表示されるようeeyesの位置を調整してください。

視線入力が上手くいかない場合：

利き目とそうでない目の差がある場合は、eeyesを終了して利き目でキャリブレーションした後にeeyesを起動ください。

アイトラッカーが発光しない場合：

USBを差し直し、改善しない場合は、eeyesを終了後に起動してください。

スイッチが入力できない場合：

スイッチが根元まで入っているか確認ください。改善しない場合は、USBを差し直すかeeyes/eeyesMiniを終了後に起動してください。

M e m o
