## 重要なお知らせ

## 【2022年5月30日よりの、重度障害者用意思伝達装置「eeyes」のメール機能におけるGmailのアカウントの利用について】

Google社よりユーザ名とパスワードによるアカウントの認証方法を2022年5 月30日にてもって廃止するとアナウンスがされております。

弊社より4月15日付でお知らせ致しました、Gmailアカウントが利用できなくな

るという件につきまして、別の対処方法を模索していたところ、次の手順の実施と制限事項

により、引き続きご利用頂ける目途が立ちましたのでお知らせ致します。

制限事項:

・介護者やご家族の方のスマートフォンで二段階認証のご承認を行う必要があります。
・この承認を求められた際は、スマートフォンでご対応頂く必要あります。

設定手順:

1) ブラウザからご利用頂いているアカウントの「Google アカウントを管理」をクリック し、続いて表示される管理画面から二段階承認プロセスの「設定する」をクリックする。



2)2段階認証プロセスの「使ってみる」をクリックし、パスワード認証を行う。



3)認証に利用する携帯電話の電話番号を入力した後に「次へ」をクリックし、確認コードが記載されたショートメッセージが携帯電話に送られてくる事を確認する。

2段階認証ブ	コセス	
	0	
電話番号の設定		
使用する電話番号を選択	してください。	
a	$\supset$	
Doogle はこの巻号をアカウント Google Voice 番号は使用しないで データ遺信料をがかかる場合があ	のセキュリティ 保護にのみ使用します。 こください。 ります。	
コードの取得方法		
◎ テキスト メッセージ	○ 音声通話	
他のオプションを表示		

4) 確認コードを入力し「次へ」をクリックする。正しいコードが入力されていれば、二段 階承認プロセスが有効にできるので「有効にする」をクリックする。



5) 管理画面から二段階承認プロセスが有効になっている事を確認し「←」をクリックする。



6)管理画面から「アプリパスワード」をクリックし、パスワード認証を行う。



 「メール」「Windows パソコン」を選んで「生成」をクリックし、生成されたアプリパ スワードを記憶しておく(パスワードはマウスで選択してコピーできます)

← アプリパスワード	生成されたアプリパスワート	S	テプリパス	フード	
アプリバスワードを使用すると、2 局端路接ブロセスに対応していないデバイス上のアプリから Geogle アカウンドにログインで使るようになります。このバスワードは一個入力すれば、以降は驚えて ちく必要はなりません。 算機		Windows パシコンのアプリ パスウード ulab tojt lzyl gkqb	アプリバスワードを使用する。 Google アカウントにログイン おく必要はありません。 SY細	5、2 段階認証プロセスに できるようになります。こ	対応していないデバイス上のアプリから このバスワードは一度入力すれば、以焼は覚え
アプリ パスワードがありません。		使い方	アプリバスワード		
アプリパスワードを生成するアプリとデバイスを選択してください。	Add your Google account	1. [メール] アプリを聞きます。 2. [設定] メニューを開きます。 3. [アカウント] を選択し、Google アカ	名前	作成日	最终使用日
×ール Windows パジコン ~	Unu aano Moosaa Alektraataan Taanood	ウントを選択します。 4. パスワードを上に表示されている 16 文字のパスワードに置き換えます。	メール (Windows パンコ ン)	8.55	
	Intuite year Story's centers, and carentin	このアプリパスワードは、通常のパスワー ドと同様に Google アカウントへの完全なア クセス権が付与されます。このパスワード	アブリ バスワードを生成するアブリとデバイスを選択してください。		
		を覚えてあく必要はないので、メモしたり 靴かと共有したりしないでください。 <del>詳和</del>		アプリを選択 ・ デバイスを選択 ・	
		<b>京</b> 了			生成

8) eeyes の介護者画面から「メール設定」をクリックし、メール設定画面に移動する。受 信パスワードと送信パスワードに先の手順で取得したアプリパスワードを設定し、「保 存」をクリックする。

